

NOTICE D'UTILISATION DES MASQUES FFP2



Avant de débiller votre masque, **lavez-vous les mains !**
La barrette nasale correspond à la partie supérieure du masque.
Incurvez délicatement le centre de la barrette nasale pour la préformer et pour maintenir le masque ouvert.



Séparez en 2 brins les élastiques qui sont encore liés.
Placez le masque sous le menton.
Passez les 2 élastiques l'un après l'autre derrière la tête.



Positionnez l'élastique inférieur sous les oreilles et l'élastique supérieur derrière la tête.



Adaptez la barrette nasale à la forme du nez avec l'aide des 2 mains pour assurer une parfaite étanchéité et obtenir l'efficacité attendue.

Pour vérifier l'étanchéité du masque : placer les 2 mains en forme de coquille sur le masque. Expirer très fortement.

Si de l'air passe autour du nez, réajuster la barrette nasale.

Si de l'air fuit sur le pourtour du masque, ramener les élastiques vers l'arrière.

Délais d'utilisation : 4 heures environ

Ne jamais remettre un masque ! Lorsque le masque est enlevé, jetez le à la poubelle et lavez-vous les mains.

